


ПРОСТОТА И ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Настоящая сила для уверенности

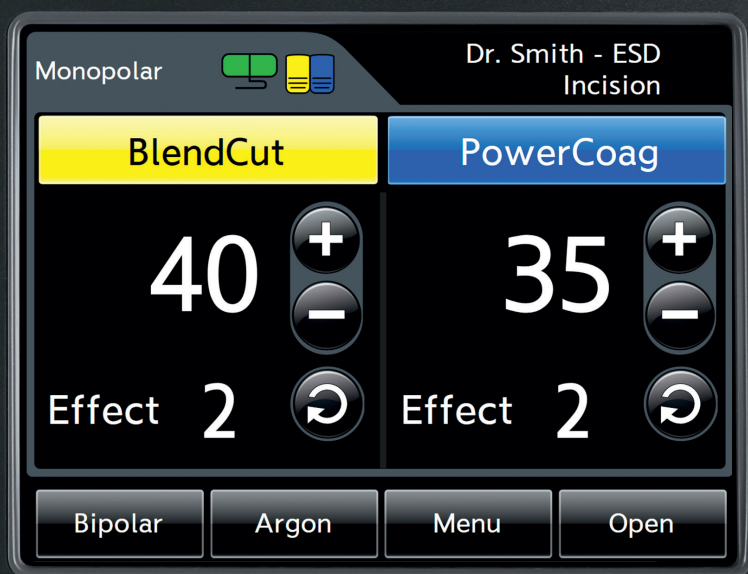

НАСТОЯЩАЯ СИЛА...

... в желудочно-кишечном тракте и бронхах

Ассортимент электрохирургического оборудования от компании Olympus позволяет врачам проводить рассечение, коагуляцию и резекцию с уверенностью в применении общепризнанных и надежных терапевтических методик.

С учетом специфических потребностей современной электрохирургии, компания Olympus понимает важность наличия безопасного специализированного источника энергии, который способен обеспечить точность, так необходимую врачам в их работе.

Электрохирургический генератор ESG-300 — это специализированный продукт компании Olympus, разработанный с учетом потребностей эндоскопистов. Он позволяет избежать сложности, связанной с использованием универсальных генераторов, и при этом является простым безопасным и интеллектуальным источником энергии.

... отвечает индивидуальным потребностям

Адаптируемость простых режимов работы для проведения всех основных электрохирургических процедур и уверенность в работе для пользователей, знакомых с другими системами.

Электрохирургический генератор ESG-300 можно настраивать для соответствия любым параметрам электрохирургии при проведении как стандартной полипэктомии, так и более сложных процедур (например, эндоскопической диссекции подслизистой [ESD]).

... настраивается специально для вашей работы

Удобная возможность с легкостью сохранять настройки режимов обеспечивает пользователям большую уверенность и безопасность при работе, а также экономит время, устраняя необходимость выбора настроек вручную.



НАСТОЯЩАЯ СИЛА...

... простым нажатием кнопки

Благодаря простому и интуитивно-понятному интерфейсу с сенсорным экраном пользователи могут с легкостью настраивать систему в соответствии с личными требованиями всего лишь в несколько этапов.

... без подключения проводов

Беспроводная ножная педаль обеспечивает независимость от внешних условий во время работы, что позволяет располагать генератор в более безопасном месте в операционной.

Простое переключение между настройками процедур без использования рук — без необходимости взаимодействовать с генератором вручную — повышает эффективность рабочего процесса.



... направляет ваши действия

Интеллектуальная система вспомогательных сообщений предоставляет простую и понятную обратную связь, позволяя пользователям с уверенностью управлять электрохирургическим генератором ESG-300.

... говорит на вашем языке

Возможность выбора из 29 языков отображения данных означает, что пользователи могут с легкостью управлять системой на понятном им языке без возникновения путаницы.




НАСТОЯЩАЯ СИЛА...

... и широкие возможности

В комбинации с электрохирургическим генератором ESG-300 можно использовать аргоноплазменный коагулятор (APU-300) для обеспечения наивысшего качества поверхностного гемостаза.

Режим SmartArgon, в котором граница коагуляции не зависит от расстояния между датчиком и тканью, позволяет достигать однородного и безопасного гемостаза с уменьшением карбонизации. Кроме того, возможность ограничивать глубину проникновения плазменного луча делает режим SmartArgon идеальным вариантом выбора для нежных тканей.

В зависимости от целевого участка ткани существуют несколько видов датчиков: латеральный, аксиальный и радиальный, что позволяет проводить точную и селективную коагуляцию.

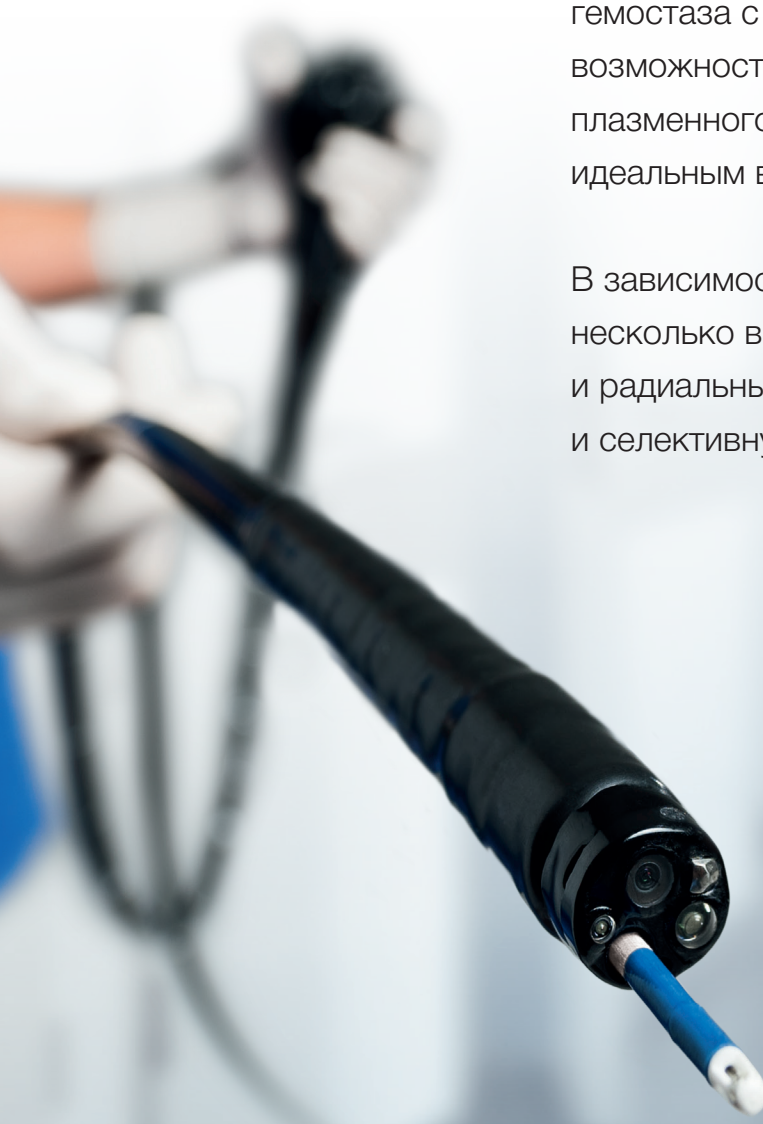

... основана на опыте

Fast Spark Monitor позволяет измерять интенсивность искрового разряда во время процедур резания, автоматически регулируя выходную мощность для достижения воспроизводимого воздействия на ткань и защиты инструментов EndoTherapy.

High-Power Cut Support — немедленное искровое зажигание позволяет проводить разрезание без первоначальной задержки, что обеспечивает превосходную эффективность разрезания.

Contact Quality Monitor анализирует контактное сопротивление нейтрального электрода, снижая риск нанесения термической травмы пациенту.

Leakage-Protection Sensor измеряет и контролирует утечку тока, сокращая риск причинения непреднамеренного повреждения пациенту или пользователю.

МОНОПОЛЯРНЫЕ ВЧ-РЕЖИМЫ

■ Режимы рассечения

PureCut (Чистое рассечение)

Режим непрерывного рассечения с низким эффектом коагуляции


PulseCut Slow/Fast (Импульсное рассечение, медленное/быстрое)

Режим прерывистого рассечения, который обычно используется во время эндоскопических процедур

BlendCut (Комбинированный режим рассечения и коагуляции)

Режим непрерывного разрезания с повышенным эффектом коагуляции идеально подходит для рассечения

High Power Cut Support (HPCS) – для немедленного рассечения
Fast Spark Monitor (FSM) – оптимизированная подача выходной мощности для режимов резания

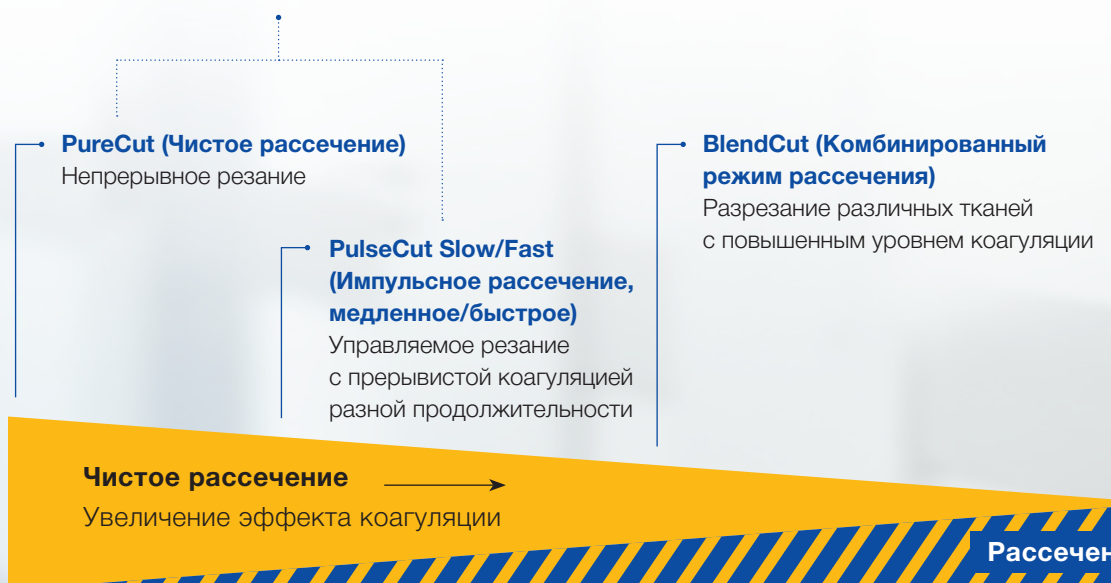

Режимы коагуляции

SoftCoag (Мягкая коагуляция)

Медленная и глубокая коагуляция – оптимально подходит для коагуляции толстых кровеносных сосудов

SprayCoag (Спрей-коагуляция)

Бесконтактная коагуляция – оптимально подходит для пероральной эндоскопической миотомии (РОЕМ)

ForcedCoag (Усиленная коагуляция)

Быстрая и эффективная коагуляция

PowerCoag (Мощная коагуляция)

Быстрая и эффективная коагуляция с повышенным уровнем рассеечения



РЕЖИМЫ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КООГУЛЯЦИИ

ForcedArgon (Усиленная аргонплазменная коагуляция)

Непрерывная подача аргонплазменного луча со стабильной выходной мощностью для быстрого и эффективного гемостаза и абляции крупных участков

PulsedArgon Slow/Fast (Импульсная аргонплазменная коагуляция, медленная/быстрая)

Непрерывная подача аргонплазменного луча с прерывистой выходной мощностью для большего контроля воздействия на ткань

SmartArgon (Интеллектуальная аргонплазменная коагуляция)

Автоматически определяет расстояние до ткани и регулирует мощность – особенно подходит для применения на нежных тканях, таких как тонкая кишка



ESG-300 — УПРАВЛЯТЬ С ЛЕГКОСТЬЮ

Электрохирургический генератор (ESG-300)

Выдвижной ящик для принадлежностей и кабелей

Тележка для системы (TC-E300)



Аргоноплазменный коагулятор (APU-300)

Беспроводная ножная педаль

Насос для подачи воды (OFF-2)

15882

Информация о заказе

Компоненты ВЧ-системы

| Номер для заказа | Артикул | Описание |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| WA90003W | ESG-300 | Электрохирургический генератор |
| WA90004W | APU-300 | Аргоноплазменный коагулятор |
| WA94034W | Беспроводная ножная педаль | С приемником и зарядным устройством |
| WA94033C | Проводная ножная педаль | Кабель, 4 м |
| K10026806 | TC-E300 (EC) | Тележка для системы, для большинства европейских стран |
| K10026805 | TC-E300 (Великобритания) | Тележка для системы, стандарт Великобритании |
| A02915A | MAJ-860 | Активный шнур для инструментов EndoTherapy, 8 мм |
| E0427213 | MAJ-814 | Соединительный кабель для одноразового нейтрального электрода |
| E0427245 | MAJ-897 | Разделенный нейтральный электрод, одноразовый, 10 шт. |
| WA94041A | Редуктор давления | Стандарт DIN 477-6, центральная и южная Европа |
| WA94042A | Редуктор давления | Стандарт DIN 477-10 |
| WA94043A | Редуктор давления | Стандарт CGA № 580 |
| WA94044A | Редуктор давления | BS 341 No. 3, Великобритания |
| WA95621A | Кабель электропитания | 4,5 м, с угловой вилкой — большинство европейских стран, тип E/F – EC |
| WA95623A | Кабель электропитания | 4,5 м, с угловой вилкой — Великобритания, тип E/F – Великобритания |

Датчики аргоноплазменной коагуляции

| Номер для заказа | Артикул | Описание | Длина | Мин. диаметр инструментального канала |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| WA94001A | PA-210K | Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для бронхов | 1500 мм | 2,0 мм |
| WA94002A | PA-211U | Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/ толстой кишки | 2200 мм | 2,8 мм |
| WA94003A | PA-212U | Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для толстой кишки | 2200 мм | 3,7 мм |
| WA94004A | PA-210Z | Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для тонкой кишки | 3000 мм | 2,0 мм |
| WA94005A | PA-211Z | Аксиальный аргоновый датчик, 10 шт., для тонкой кишки | 3000 мм | 2,8 мм |
| WA94006A | PA-221U | Латеральный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/ толстой кишки | 2200 мм | 2,8 мм |
| WA94007A | PA-231U | Радиальный аргоновый датчик, 10 шт., для желудка/ толстой кишки | 2200 мм | 2,8 мм |

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

OLYMPUS

ООО ОЛИМПАС МОСКВА

Россия, 107023, г. Москва
ул. Электrozаводская, д.27, стр. 8
тел.: +7 (495) 926 70 77
факс: +7 (495) 926 70 72
www.olympus.com.ru

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург
3-я линия В.О. д. 62, Лит. А.
тел.: +7 (812) 385-47-90
факс: +7 (812) 385-47-93
www.olympus.com.ru

Украина, 01032, г. Киев
бул. Т. Шевченко, д. 336
тел.: +38 (044) 730-21-57
факс: +38 (044) 594-48-01
www.olympus.com.ru

Казахстан, 050012
г. Алматы, ул. Шевченко
д. 118, оф. 217
тел.: +7 (777) 399-74-96
www.olympus.com.ru